



CATÁLOGO DE PRODUTOS



implant_medical



(11) 91234-5678



implantmedical.com.br

Sumário

Incontinência Urinária

Esfíncter Urinário Artificial.....	4
------------------------------------	---

Disfunção Erétil

Implante Peniano Inflável.....	6
Implante Peniano Maleável (semi-rígido).....	7
Implante Peniano Maleável (macio).....	8

Ginecológico


Expansor Vaginal.....	10
-----------------------	----

Referências

Nomes dos Produtos e Referências.....	12
---------------------------------------	----

INCONTINÊNCIA URINÁRIA

Esfíncter Urinário Artificial

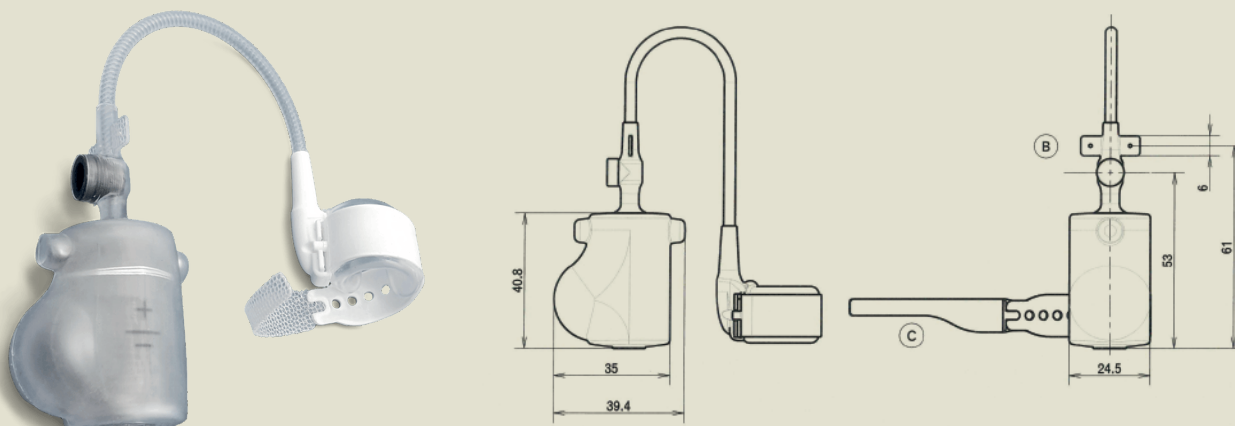

Designação do Produto: Esfíncter Urinário Artificial & Acessórios
REF: ZSI 375 PF

Descrição


O Esfíncter Urinário Artificial ZSI 375 PF é um dispositivo médico implantável, concebido para corrigir a incontinência urinária secundária a uma deficiência intrínseca do esfíncter urinário. O dispositivo é composto por dois componentes, o *Cuff* e o *Pump*. No *Cuff* o dispositivo é fornecido com um manguito insuflável e ajustável único que se adapta a diferentes tamanhos de uretra. No *Pump*, estão contidos a bomba e o balão regulador de pressão, colocados no escroto.

Especificações

- Pronto para ser implantado, não requer preparação.
 - Pré-conectado.
 - Pré-preenchido com solução salina.
 - *Cuff* ajustável de 4 a 6 cm.
 - Fecho de botão do *Cuff*.
 - Pressão ajustável de 0 cm H₂O a mais de 120 cm H₂O. ZSI 375 PF é fornecido com uma pressão padrão de 90 cm H₂O (90 +/-5cm H₂O). A pressão padrão pode ser aumentada ou diminuída durante a implantação e/ou durante a vida útil do esfíncter, injetando ou retirando solução salina da bolsa de compensação.
 - A pressão pode ser controlada pelo sensor de pressão a qualquer momento.
 - MCBF (ciclo médio antes da falha): 30.000 ciclos.
 - Fornecido com duas agulhas Huber.
- O sensor de pressão não está incluído na caixa ZSI 375 PF.

DISFUNÇÃO ERÉTIL

Implante Peniano Inflável

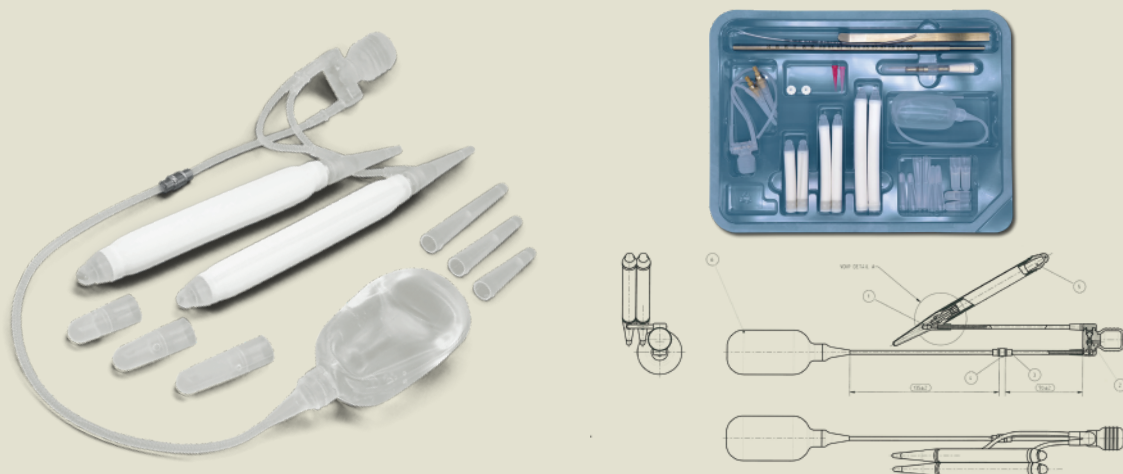

Designação do Produto: Implante Peniano & Acessórios
REF: ZSI 475

Descrição

O Implante Peniano Inflável ZSI 475 foi projetado para tratar a disfunção erétil. O dispositivo é composto por dois cilindros infláveis conectados a uma bomba manual e um reservatório. Os cilindros são implantados nos corpos cavernosos; a bomba é implantada no escroto, e o reservatório é implantado na pélvis.

Especificações

- Implante projetado para corpos cavernosos de 12 a 24 cm.
- Peças infláveis de 13 cm, 16 cm e 19 cm incluídas na caixa.
- Revestimento PVP hidrofílico contra infecções.
- Bomba manual para encher e esvaziar o dispositivo.
- MCBF (ciclo médio antes da falha) > 3.000 ciclos (3 ereções por semana, 52 semanas por ano, durante 10 anos x2).

Acessórios na caixa

- Extensores proximais 10, 20 e 30 mm.
- Extensores distais 10 e 20 mm.
- Dois conjuntos de conectores.
- Duas agulhas e linhas.
- Dois conectores especiais para preencher o dispositivo.
- Um medidor/introdutor.

Dilatadores e/ou cavernótomos não estão incluídos na caixa.

Implante Peniano Maleável (semi-rígido)



Designação do Produto: Implante Peniano Maleável
REF: ZSI 100

Descrição


O Implante Peniano Maleável ZSI 100 foi projetado para tratar a disfunção erétil. É composto por dois cilindros maleáveis feitos de silicone, com um núcleo interno de prata pura. Os dois cilindros são implantados nos corpos cavernosos.

Especificações

- Revestimento PVP hidrofílico contra infecções.
- Para corpos cavernosos de 120 a 250 mm:
 - Comprimento máximo: 250 mm.
 - Comprimento mínimo (após corte): 120 mm.
- Extensores de 1,5 cm; comprimento mínimo 1 cm após o corte.
- MCBF (ciclo médio antes da falha): 14.000 ciclos.

Medidor e dilatadores não estão incluídos na caixa.

Implante Peniano Maleável (macio)

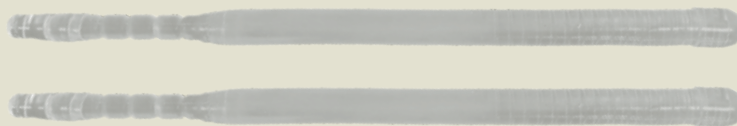

Designação do Produto: Implante Peniano Maleável
REF: ZSI 100 CF

Descrição

O Implante Peniano Maleável ZSI 100 foi projetado para tratar a disfunção erétil ou para manter o espaço livre de fibrose durante a cicatrização após a infecção de um implante. É composto por dois cilindros maleáveis de silicone, implantados nos corpos cavernosos.

Especificações

- Revestimento PVP hidrofílico contra infecções.
- Para corpos cavernosos de 120 a 250 mm:
 - Comprimento máximo: 250 mm.
 - Comprimento mínimo (após corte): 120 mm.
- Extensores de 1,5 cm; comprimento mínimo 1 cm após o corte.
- MCBF (ciclo médio antes da falha): 100.000 ciclos.


Medidor e dilatadores não estão incluídos na caixa.

Instruções

- Tratamento da disfunção erétil.
- Prótese fantasma para preservar o espaço nos corpos cavernosos após a remoção de uma prótese peniana.
- Tratamento da doença de Lapeyronie.
- Manutenção do invólucro peniano.

GINECOLÓGICO

Expansor Vaginal

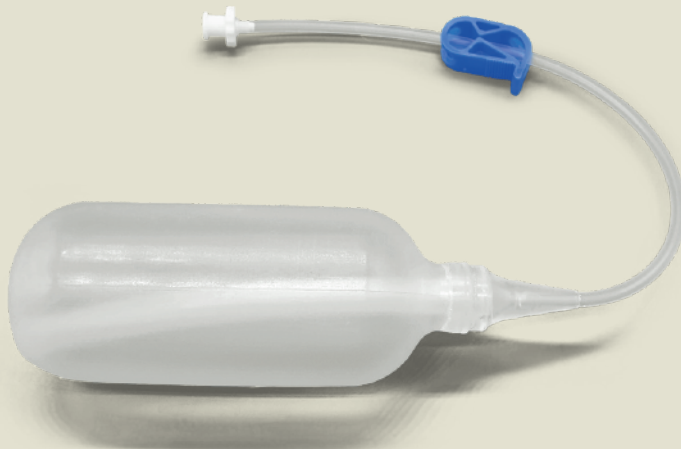

Designação do Produto: Expansor
REF: ZSI 200 NS

Descrição

O Expansor Vaginal ZSI 200 NS permite que as cavidades vaginais sejam pressionadas contra as paredes pélvicas, promovendo a microvascularização do enxerto após vaginoplastia. O Expansor Vaginal também reduz o risco de estenose ou retração vaginal pós-radioterapia ou pós-operatória.

Especificações

- O dispositivo é um cilindro inflável com uma pinça e um conector.
- Feito de silicone biocompatível.
- Comprimentos disponíveis: 90 mm e 120 mm.
- Diâmetro inflado: 40 mm.

Instrução de uso

- Escolha o tamanho: 90 mm ou 120 mm de acordo com o comprimento da vagina.
- Fácil inserção e remoção no pós-operatório e nos cuidados de enfermagem.
 - Insira o dispositivo na vagina, preencha-o (90 mm = 100 ml, 120 mm = 130 ml) e prenda.
 - Solte e esvazie o dispositivo para removê-lo.

REFERÊNCIAS

Nomes dos Produtos e Referências

Incontinência Urinária

Esfíncter Urinário Artificial	ZSI 375 PF
-------------------------------	------------

Disfunção Erétil

Implante Peniano Inflável	ZSI 475
Implante Peniano Maleável (semi-rígido)	ZSI 100
Implante Peniano Maleável (macio)	ZSI 100 CF

Ginecológico

Expansor Vaginal	ZSI 200 NS
------------------	------------



Para mais informações, acesse:

www.implantmedical.com.br



implant_medical



• (11) 91234-5678

Implant Medical
Av. Saúde e Bem-Estar, 1234
Centro Médico, Sala 567
São Paulo, SP, 01234-567